

Produktinformation

FD multi wipes/FD multi wipes compact

Vliestücher



FD multi wipes/FD multi wipes compact auf einen Blick

- Hochwertige, reißfeste und fusselfreie trockene Vliestücher in wiederbefüllbarer Spenderbox.
- Universell einsetzbar für die Gebrauchslösungen von FD 300 und FD 312 sowie mit FD 322, FD 333, FD 333 forte oder FD 366 sensitive.
- Fein strukturierte Vliestücher – sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen der Oberflächen.
- Extragroße Tücher mit 200 x 300 mm oder 290 x 300 mm.
- Nachgewiesene Desinfektionswirkung und Stabilität der Wirkstofflösungen.
- Wirksam vom ersten bis zum letzten Tag – verwendbar über 28 Tage bis 3 Monate.
- Praktische wiederverschließbare Spenderbox zum Nachfüllen.
- Hohe Wirtschaftlichkeit – große Zeitersparnis durch einmalige Herstellung der getränkten Desinfektionstücher und sparsamer Desinfektionsmittelverbrauch. Ausreichend für 180 bzw. 60 Desinfektionsvorgänge.

Eigenschaften

FD multi wipes/FD multi wipes compact aus der Dürr System-Hygiene sind besonders hochwertige, reißfeste Vliestücher.

FD multi wipes/FD multi wipes compact sind allgemein zum Tränken mit Flächen-Desinfektionsmitteln geeignet. Dürr Dental empfiehlt die Gebrauchslösungen der Konzentrate von FD 300 oder FD 312 und die gebrauchsfertigen Präparate FD 322, FD 333, FD 333 forte oder FD 366 sensitive. FD multi wipes/

FD multi wipes compact geben die Desinfektionslösung sehr gut ab und gewährleisten die vollständige Benetzung der zu desinfizierenden Flächen. FD multi wipes/FD multi wipes compact lassen sich aufgrund ihrer Größe und ihres Materials leicht falten und den Anforderungen anpassen, so dass auch kleine und verwinkelte Oberflächen erreicht werden können. Die Verwendung der FD multi wipes/FD multi wipes compact reduziert die Vorbereitungszeit für die Desinfektionsmaßnahmen und den Desinfektionsmittelverbrauch. Die getränkten FD multi wipes/FD multi wipes compact in der Spenderbox sind vor Kontamination und Verdunstung geschützt.

Produktzusammensetzung

FD multi wipes sind Vliestücher in einer Größe von 200 x 300 mm. FD multi wipes compact sind Vliestücher in einer Größe von 290 x 300 mm.

Anwendung

FD multi wipes/FD multi wipes compact werden zur Reinigung und Desinfektion von Flächen wie Behandlungseinheiten, Arbeitsflächen, Wänden, Gegenständen aller Art, medizinischen Geräten, etc. angewendet. FD 300 entsprechend der gewünschten Einwirkzeit als 1 bis 3 %-ige Wirkstofflösung und FD 312 als 1 bis 2 %-ige Lösung herstellen. FD 322, FD 333, FD 333 forte oder FD 366 sensitive sind gebrauchsfertige Lösungen, die ohne Verdünnung angewendet werden. Vliestücher in der Spenderbox der FD multi wipes mit 2,5 l Wirkstofflösung, bzw. der FD multi wipes compact mit 1,4 l Wirkstofflösung gleichmäßig tränken, Tuch einfädeln, Spenderbox dicht verschließen und 30 bis 60 Minuten bis zur erstmaligen Anwendung abwarten. Auf dem jeder Vliesrolle beiliegenden Etikett Produktname, Konzentration,

Produktinformation

FD multi wipes/FD multi wipes compact

Vliestücher

Chargenbezeichnung, Ansatzdatum und Haltbarkeit sowie den Namen der verantwortlichen Person eintragen und auf dem wiederverschließbaren Deckel der Spenderbox aufkleben. Tuch entnehmen und die zu desinfizierende Oberfläche durch Wischen vollständig benetzen. Einwirkzeit entsprechend Gebrauchsinformation des eingesetzten Desinfektionsmittels einhalten. Handschuhe anziehen. Spenderbox nach jeder Tuchentnahme wieder dicht verschließen. Vor Wiederbefüllung bzw. Produktwechsel Vlies- und Flüssigkeitsrückstände aus der Spenderbox entfernen sowie Etikett auf dem Deckel entsorgen und Spenderbox aufbereiten. Manuelle Aufbereitung: Verschmutzungen und Rückstände mechanisch ablösen und entfernen. Spenderbox inkl. Deckel innen und außen mit heißem Leitungswasser (> 55° C - Achtung: Verbrühungsgefahr!) gründlich abspülen und mit Einmaltuch trocknen. Danach Spenderbox und Deckel mit einem Einmaltuch, getränkt mit alkoholischer Schnelldesinfektion (z.B. FD 322 oder FD 333), vollständig benetzen und gründlich desinfizieren (Einwirkzeit beachten!). Auf eine vollständige Abtrocknung achten. Maschinelle Aufbereitung als Alternative: Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei bis zu 93 °C chemothermisch aufbereiten und trocknen. Neue Tuchrolle in die gereinigte und getrocknete Spenderbox geben und - wie oben beschrieben - tränken, Tuch einfädeln, Deckel dicht verschließen, neu beschriftetes Etikett auf den Deckel kleben, Wartezeit abwarten. Kontaminierte Spenderboxen nicht aufbereiten, sondern entsorgen. Frei herausragende Tücher können kontaminiert sein, daher verwerfen. Entnommene Tücher nicht in den Eimer zurückschieben. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Defekte Spenderboxen austauschen.

Umweltverhalten

Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Gebrauchte Tücher über Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen.

Haltbarkeit

Getränkte Tücher innerhalb von 28 Tagen bis 3 Monaten aufbrauchen. Detaillierte Informationen siehe Produktinformationen zu den Präparaten im Internet.

Packungsgrößen

FD multi wipes:

Spenderbox mit 1 Tuchrolle à 180 Tüchern.

Nachfüllpackung mit 4 Tücherrollen à 180 Tüchern im Karton.

FD multi wipes compact:

Spenderbox mit 1 Tuchrolle à 60 Tüchern.

Nachfüllpackung mit 8 Tücherrollen à 60 Tüchern im Karton.

Allgemeine Hinweise

Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.



Vertrieb

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de